

Menekítő szék

Kezelési útmutató



NYIRLIFT

Tel./Fax.: +36 (42) 490-454, 596-736 E-mail: nyirlift@nyirlift.hu www.nyirlift.hu

Menekítő szék

Gyors menekítés vészhelyzetben.



Szekrény a
menekítő szék
tárolásához

NYIRLIFT

Tel./Fax.: +36 (42) 490-454, 596-736 E-mail: nyirlift@nyirlift.hu www.nyirlift.hu

Bevezetés

Köszönjük, hogy a menekítő szék megvásárlása mellett döntött. Kérem, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy vészhelyzetben biztonsággal tudja kezelni az eszközt. A későbbiekben is informálódjon a menekítő szék kezelését illetően, ismételje és bővítse ismereteit oktatások által. A menekítő szék olyan emberek számára lett kifejlesztve, akik vészhelyzetben nem tudnának a lépcsőn gyorsan kimenekülni, például mozgáskorlátozottak, kritikus egészségi állapotban lévő személyek vagy idős emberek.

FIGYELEM! Ez a készülék nem képes a lépcsőn felfelé haladni. A készülék csak személyszállításra alkalmas, ettől eltérő használata nem megengedett.

Típus, sorozatszám

Minden készülék egy sorozatszámmal van ellátva. Kérjük, hogy minden érdeklődéskor közölje velünk a gép sorozatszámát és a vásárlás dátumát. A sorozatszám a készülék oldalára van írva.

Kérem, írja bele ebbe a kezelési útmutatóba, az alábbi mezőbe az Ön készülékének sorozatszámát és a vásárlás dátumát.

Sorozatszám:	
Vásárlás dátuma:	évhónapnap

Biztonsági intézkedések

A biztonságos üzemeltetés érdekében a kezelési útmutató megfelelő részei fontos biztonsági intézkedéseket tartalmazó információkkal van ellátva. Ezek a következő formában jelenhetnek meg:

 FIGYELEM!	Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása vagy a készülék nem rendeltetésszerű használata az érintett személy egészségét vagy életét veszélyeztetheti!
 VIGYÁZAT!	Ennek az utasításnak a figyelmen kívül hagyása vagy a készülék nem rendeltetésszerű használata az érintett személy sérülését okozhatja, valamint a készülék vagy a hozzá tartozó tárgyak károsodásához vezethet!

Ezt a kezelési útmutatót minden esetben mellékelje a készülékhez!


Tartalomjegyzék

1.	A biztonságos használat alapjai	5
2.	Specifikációk	6
3.	A készülék főbb részei.....	7
4.	Előkészületek	7
5.	Utas becsatolása.....	8
6.	Elindulás sík terepen	9
7.	Lefelé haladás a lépcsőn.....	9
8.	Összecsukás és tárolás.....	11
9.	Napi karbantartás	11




Lépcsőn történő használat előtt a következőkre figyeljen

Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a lépcső szélessége és a lépcsőforduló méretei elegendő nagyok-e a menekítő szék használatához.

A minimálisan szükséges méretek, a mellékelt ábrán milliméterben értendők. (1840 x 1050 x 900).

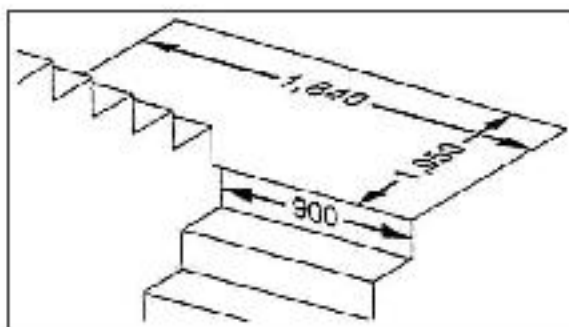

A menekítő széket nem szabad használni íves lépcsőkön, csigalépcsőkön vagy a 40°-ot meghaladó emelkedési szögű egyenes lépcsőkön sem.

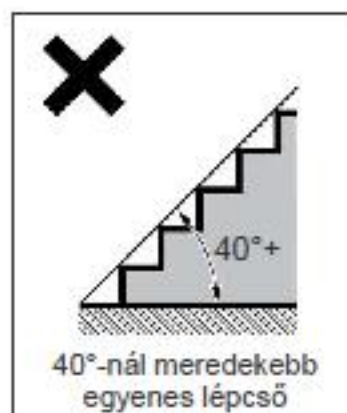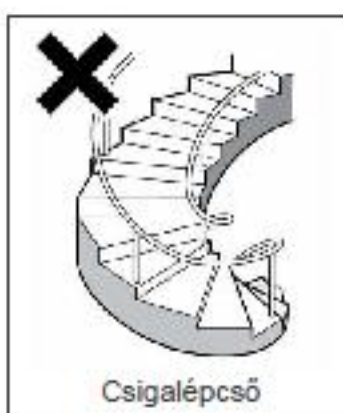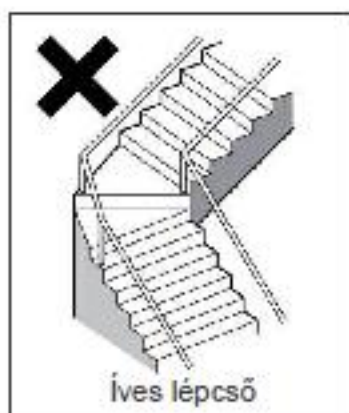

2. Specifikációk

Megnevezés:	Menekítő szék		
Típus:	CD – 7 – 1		
Menekíthető személyek száma:	1		
Tömeg:	20 kg		
Sebességvezérlés:	Hidraulikus fojtás		
A lépcsőn használható fék:	Kézifék, alaphelyzetben zárt		
Méretek:	Maximális hossz: (mm)	1310 (üzem közben)	1100 (csukva)
	Maximális szélesség: (mm)	426 (üzem közben)	426 (csukva)
	Maximális magasság: (mm)	810 (üzem közben)	270 (csukva)
Leereszkedési sebesség (m/s)		1,1 (65 kg-os utas a 40°-os lépcsőn)	
Maximálisan megengedett lépcsőmeredekség:		40°	
Maximális terhelhetőség:		135 kg	

1. A biztonságos használat alapjai

1. Minden használat előtt ellenőrizze a menekítő széket

- A kezelőnek használat előtt ellenőriznie kell a menekítő széket. Keressen sérüléseket, hiányosságokat, tárja fel a használatot kizáró esetleges hibákat. A biztonságos használat előtt ez elengedhetetlen.




2. A kezelést csak az arra képzett személy végezze

- A kezelőnek a készülék használatára megfelelően képzettnek kell lennie. A kezelő számára az első használat előtt biztosítani kell a megfelelő oktatást.
- Ez a készülék nem tud a lépcsőn felmenni. A készülék csak személyszállításra alkalmas, ettől eltérő használata nem megengedett.



3. A helyes használat

- Soha ne használja a menekítő széket 40°-nál nagyobb emelkedési szögű egyenes lépcsőn, csigalépcsőn, piszkos, jeges, nedves, csúszós vagy egyéb alkalmatlan lépcsőkön.
- A lépcső irányától eltérő, ferde irányú lefelé haladás a lépcsőn nagyon balesetveszélyes. A kezelőnek ezért kerülnie kell a ferde irányú mozgatót a lépcsőn. Mindig a helyes szögben közelítse meg a lépcsőt.
- A menekítő szék lefelé történő haladása közben a kezelőnek mindig figyelnie kell a készülék elejét és az előtte lévő lépcsőfokokat.

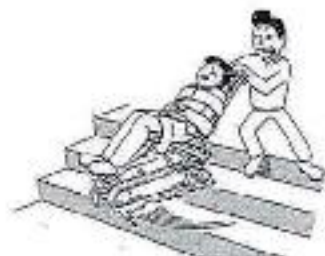


4. Készülék megállítása

- Azonnal állítsa meg a készüléket, ha nehézségek lépnek fel, a készülék nem szabályosan működik vagy az megsérült. A hiányos készülék használata súlyos balesethez vezethet.




3. A készülék főbb részei

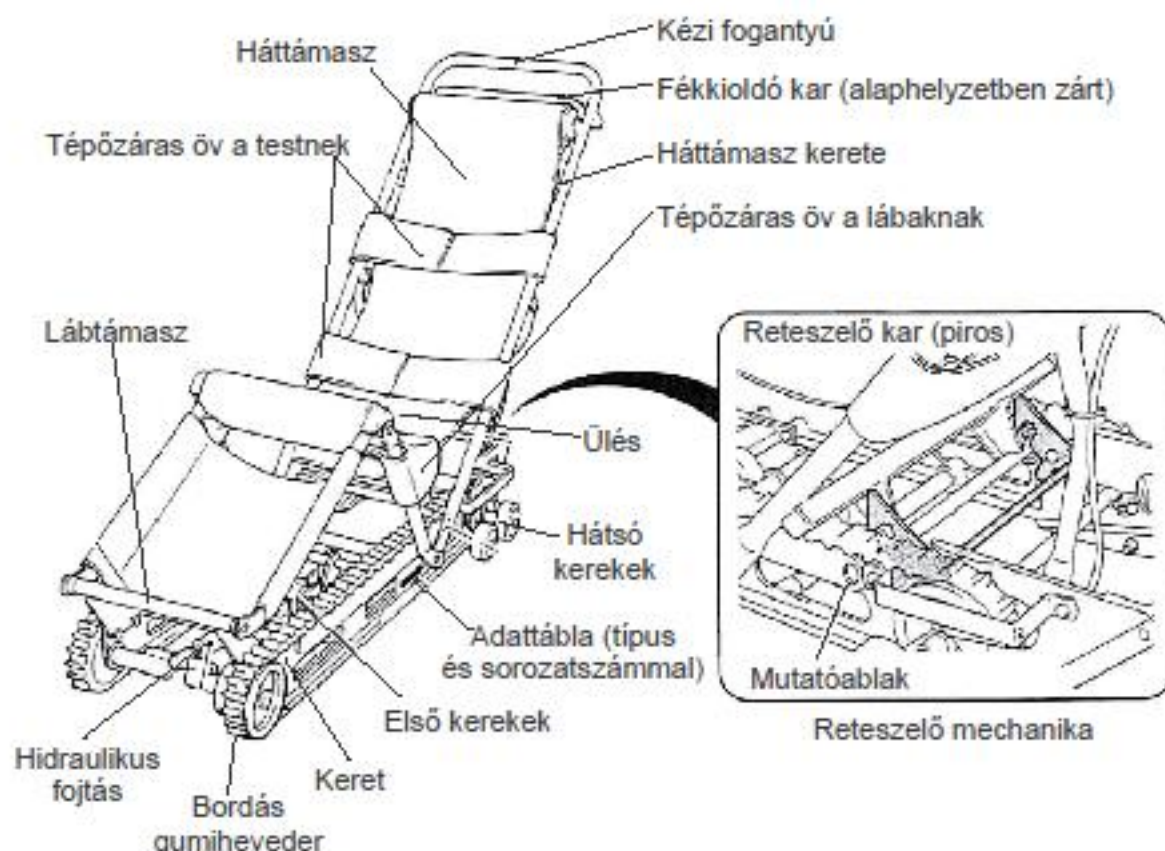

4. Előkészületek

1. Vegye elő a készüléket az ágy alól vagy a tároló szekrényből.
2. Fogja meg a kézi fogantyú végét. Húzza ki a kart, majd gyorsan és egyenletesen húzza felfelé, addig, amíg egy kattantást nem hall (a reteszelő mechanika aktív). Ezután nézze meg, hogy a mutatóablakban a kék szín látszik-e. A háttámla keretének előkészítése akkor ért véget, ha az nem tud visszacsukódni a tárolási helyzetébe.

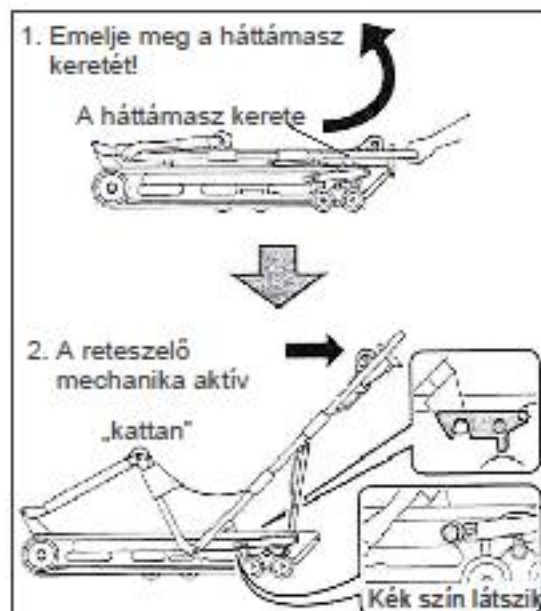


VIGYÁZAT!

A nem reteszelődjött háttámlával ne használja a gépet. Használat előtt győződjön meg, hogy a reteszelés biztosan bekattant-e a helyére.

5. Utas becsatolása


1. Állítsa fel a készüléket az ágygal vagy a kerekes székekkel párhuzamosan.
2. Hagyja ebben az állapotban a menekítő széket egészen addig amíg az utas rá nem kerül. Először az utas altestét helyezze át a készülékre. Az utas talpát tegye a lábtartóra majd az egész testét fektesse a háttámaszra.
3. Helyezze fel a tépőzáras öveket a testre és a lábakra, így rögzítve az utast a menekítő székre.

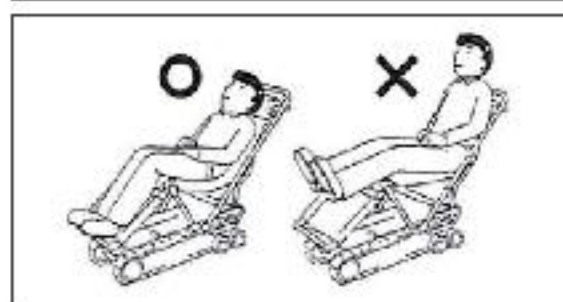

VIGYÁZAT!

Az utas törzsét helyesen fektesse a készülék ülésébe. Az utas különösen a háttámasz területén legyen jól rögzítve, mert a készülék menet közben billeghet.

FIGYELEM! Az utas karjainak mindenképpen a test-övek alatt kell lenniük, mert ezáltal valósul meg helyes rögzítés.

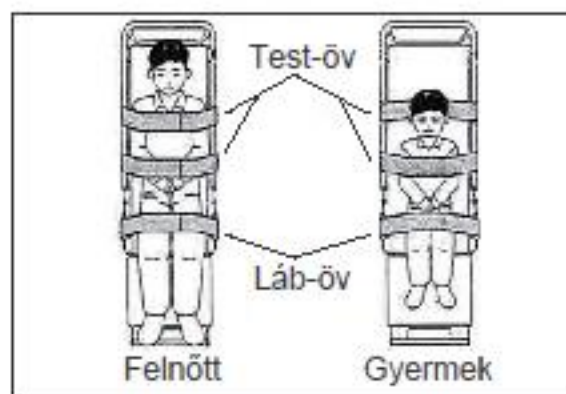

FIGYELEM!


Ha az utas a lépcsőn való szállítás közben nincs becsatolva, az utas leeséséhez vezet. Soha ne próbálja meg az utast szállítani, amíg az nincs az övekkel biztonságosan rögzítve.

6. Elindulás sík terepen

1. Tolja a készüléket és közben tartsa nyomva a fékkioldó kart. A készülék mozog a saját hat kerekén.

FIGYELEM! Ahhoz, hogy a fékkioldó kart egyszerűbb legyen nyomni, nyomja le egy kicsit a kézi fogantyút, hogy a készülék eleje felemelkedjen.

2. A készülék forgatásához, nyomja le egy kicsit a kézi fogantyút úgy, hogy a hátsó kerekek leérjenek. Ebben a helyzetben már könnyen elforgatható a menekítő szék.
3. Ha a fékkioldó kart elengedik, a készülék azonnal megáll.

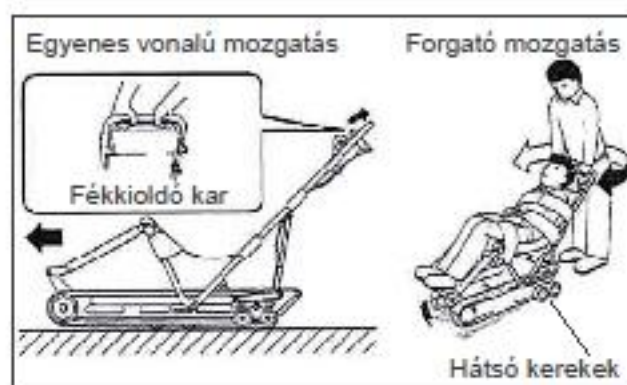


FIGYELEM!

Soha ne próbáljon meg úgy elindulni lefelé a lépcsőn, hogy a készülék első kerekei nem érnek le a talajra.

7. Lefelé haladás a lépcsőn


1. Amikor a készülékkel megközelíti a lépcső legfelső fokát, csökkentse a mozgás sebességét. Bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék első kerekei a földön vannak.

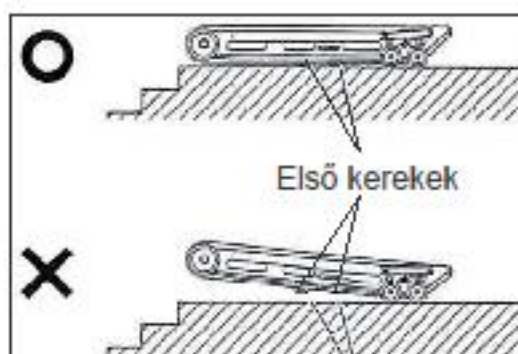

FIGYELEM!

A menekítő szék lépcsőfordulóban történő felállításakor előfordulhat, hogy az első kerekek és a talaj közt nincs kapcsolat. Ekkor fennáll a veszélye, hogy a készülék az egyensúly hiányában a lépcsőre esik.

2. A lépcsőt mindig helyes szögben közelítse meg a menekítő székekkel.

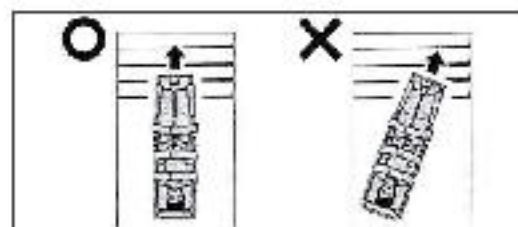

FIGYELEM!

Soha ne próbáljon meg a lépcsőn ferde irányban lemenni a menekítő székekkel. Ez a készülék veszélyes billegéséhez vezethet.

3. Ha a menekítő szék első kerekei elhagyják a legfelső lépcsőfok élét, az automatikusan megállítja a készüléket. Ezután engedje fel a fékkioldó kart ezáltal a fék rögzülni fog. Kezdje el óvatosan megemelni a kézi fogantyút és billentse a készüléket előre a lépcső irányába.



FIGYELEM! Addig ne nyomja meg a fékkioldó kart, amíg nem készült fel a lépcsőn történő lefelé haladásra.

4. Először csak az után szabad benyomni a fékkioldó kart, ha a gumihevederek a lépcső éleire felültek, azokra teljesen feltámaszkodtak. A készülék a saját súlyánál fogva kezd lefelé haladni a lépcsőn.

FIGYELEM! A lefelé haladás sebességét egy hidraulikus fojtószelep automatikusan vezérli.

5. A készülék lépcsőn történő megállításához lassan engedje fel a fékkioldó kart. A menekítő szék meg fog állni. Ha elkerülhetetlenné válik, hogy a kezelő eltávolodjon a menekítő széktől, például egy akadály eltávolítása miatt, akkor gondoskodnia kell arról, mindegyik gumiheveder legalább három lépcsőfok élén támaszkodjon és a készülék stabil legyen.

6. Ha be kell kanyarodni egy lépcsőfordulóban, nyomja le a kézi fogantyút úgy, hogy a hátsó kerekek földet érjenek és azokon gördítve elvégezheti a kanyarodást (ugyan úgy történik ez is, mint a 6. fejezet 2. pontjában). Gondoskodjon róla, hogy a következő lépcső megközelítésénél is a helyes szög irányában induljon el lefelé. (lásd: 7.2.-es fejezet)

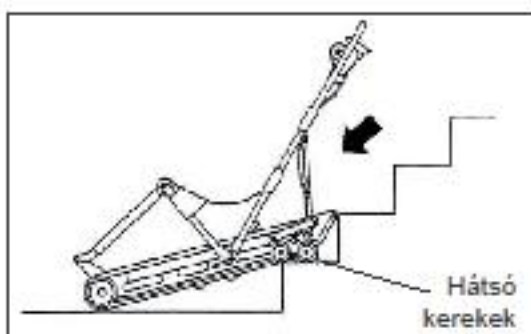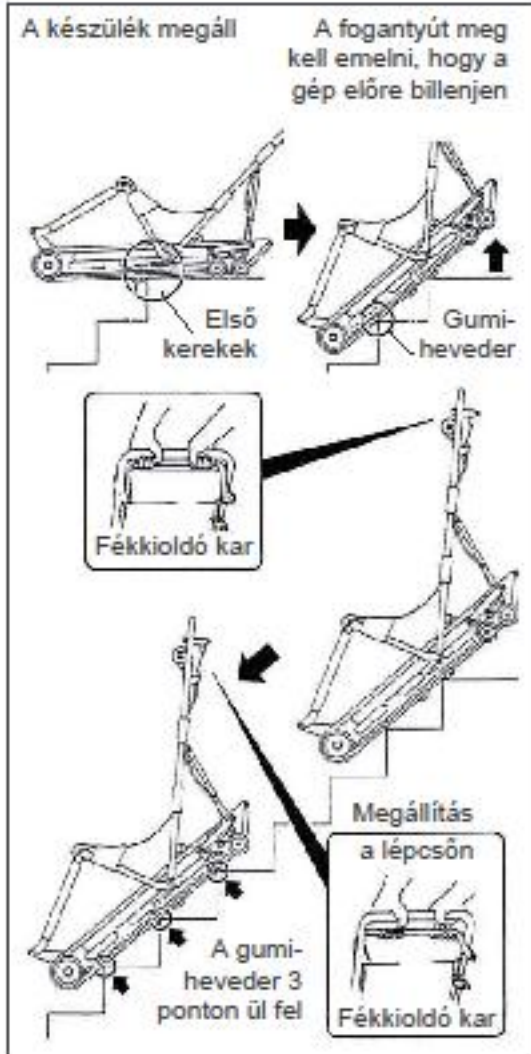

FONTOS! Ha a menekítő szék leért a lépcső aljára, vagy az egyik lépcsőfordulóba vagy egy pihenőbe, akkor erőteljesen nyomja le a kézi fogantyút, hogy a hátsó kerekek földet érjenek. A hátsó kerekekre támaszkodva lehet kanyarodni a készülékkel, illetve ha már nem a lépcsőn kell menni, hanem sík talajon, a kerekeken gyorsabban lehet a menekítést végezni.




FIGYELEM!

Soha ne próbáljon meg úgy elindulni lefelé a lépcsőn, hogy a készülék első kerekei nem érnek le a talajra.

8. Összecsukás és tárolás

1. Nyomja meg a reteszelő kart, ami az ülés alatt található, majd csúsztassa a háttámasz keretét előre úgy, hogy a keret összecsukódjon.
2. Tegye el a készüléket egy könnyen elérhető helyre például egy ágy alá vagy egy szekrénybe.

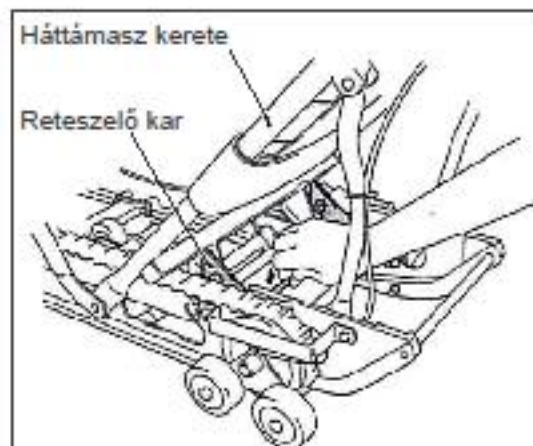

VIGYÁZAT!

A háttámasz kerete ollószerűen csukódik össze. Tartsa a kezeit távol az összecsukódó szerkezettől.

9. Napi karbantartás

Gumiheveder

- Teljesen távolítsa el róla az olajos szennyeződéseket.
- Ellenőrizze a hevederen vannak-e repedések, kopások. Ha hibát állapít meg, azonnal állítsa le a gépet és pótolja újakkal a hibás hevedereket.

Fék és fékvezeték

- Győződjön meg róla, hogy a fékkioldó kar normálisan működik-e és ha a fékkioldó kart felengedi, a fék automatikusan fékez-e.
- Ellenőrizze, hogy a fékvezetéken vannak-e sérülések és kopások. A hibás fékvezeteket cserélje ki egy újra.



Reteszelő kar

- Ellenőrizze, hogy hibátlanul működik-e a reteszelő kar és hogy a háttámasz kerete a reteszeléskor, nem esik-e vissza a kiindulási helyzetébe.

Hidraulikus fojtószelep

- Ellenőrizze, hogy az fojtószelepen és a környező területeken van-e olajszivárgás. Ha ilyen meghibásodást tapasztal, semmiképp ne használja a menekítő székét és a hiba javítása érdekében forduljon szakszervizhez!